


Voordelen van uw Cochlear™ Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer)

De Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) biedt u kwalitatief hoogwaardig gestreamde audio vanuit uw tv, muziekinstallatie, computer of soortgelijk apparaat rechtstreeks naar uw geluidsprocessors.

Opmerking: De tv-streamer kan worden gekoppeld met meerdere Baha geluidsprocessors voor bilateraal gebruik en om meerdere gebruikers naar dezelfde tv-streamer te laten luisteren.



Overzicht van het product

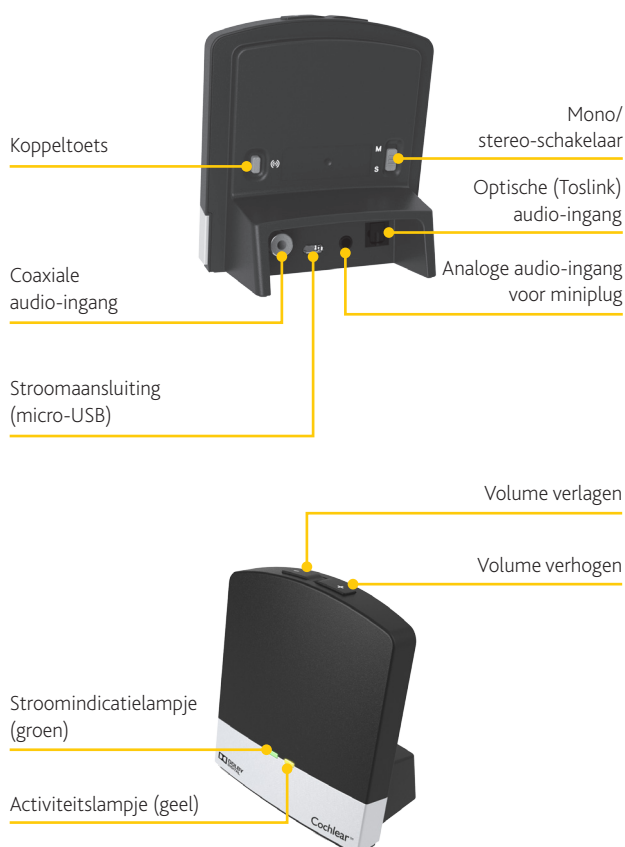

Aan de slag

Vraag uw audioloog of uw geluidsprocessor gekoppeld is met uw tv-streamer. Een geluidsprocessor die al eerder gekoppeld werd, hoeft niet opnieuw te worden gekoppeld. Als uw geluidsprocessor nog niet gekoppeld is, volg dan de instructies voor het eenvoudig koppelen van uw geluidsprocessor met uw tv-streamer op de laatste pagina van deze handleiding.

De tv-streamer ondersteunt zowel analoge als digitale audio-input. Afhankelijk van uw tv, muziekinstallatie, computer of ander audioapparaat, kan de tv-streamer op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Deze worden op de volgende pagina's besproken.


Voor het installeren van de tv-streamer moet u in ieder geval de volgende handelingen uitvoeren (ongeacht het gebruikte audioapparaat):

- A** Steek de voedingskabel in de micro-USB-aansluiting van de tv-streamer.
- B** Steek het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact. Sluit de tv-streamer aan op uw audioapparaat op één van de volgende 5 manieren.

De Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) gebruiken


De tv-streamer aansluiten op een analoge audiobron (bv. tv of muziekinstallatie).

- A** Steek de miniplug van de audiokabel in de audio-ingang van de tv-streamer.
- B** Steek het andere uiteinde van de audiokabel in de "AUDIO OUT"-uitgang van de audiobron. De "AUDIO OUT"-uitgang is meestal gemarkeerd met "L – R" voor links en rechts, en bevindt zich normaal gesproken aan de achterkant van de audiobron.

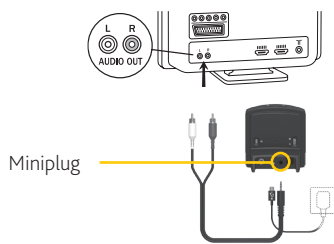


De tv-streamer aansluiten op een analoge audiobron via een miniplug die u in de hoofdtelefoonaansluiting van uw audiobron steekt.

- A** Steek de miniplug van de audiokabel in de audio-ingang van de tv-streamer.
- B** Verbind de miniplug met de rode en witte stekkers aan het andere uiteinde van de audiokabel.
- C** Steek de miniplug in de hoofdtelefoonuitgang van de audiobron.

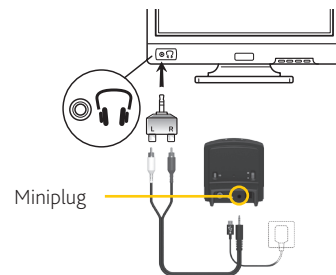


De tv-streamer aansluiten op een analoge audiobron via een scart-aansluiting.

- A** Steek de miniplug van de audiokabel in de audio-ingang van de tv-streamer.
- B** Verbind de scart-aansluiting met de rode en witte stekkers aan het andere uiteinde van de audiokabel.
- C** Steek de scart-aansluiting in de scart-uitgang van de audiobron.

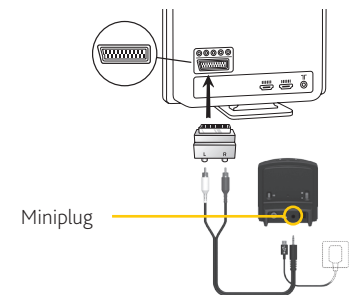


De tv-streamer aansluiten op een digitale audiobron via de optische (Toslink) audio-ingang.

- A** Steek één van de stekkers van de optische audiokabel in de optische audio-ingang van de tv-streamer.
- Opmerking:** De meeste optische kabels worden geleverd met een klein beschermkapje om het uiteinde van de stekker te beschermen. Verwijder dit beschermkapje voordat u de kabel in de ingang steekt.
- B** Steek het andere uiteinde van de optische audiokabel in de "Digital Audio Out/Optical"-uitgang van uw audiobron.

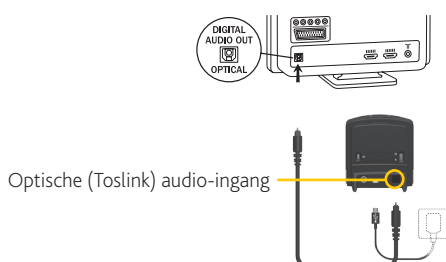

De tv-streamer aansluiten op een digitale audiobron via de coaxiale audio-ingang.


- A** Steek één van de stekkers van de coaxiale audiokabel in de coaxiale audio-ingang van de tv-streamer.
- B** Steek het andere uiteinde van de coaxiale audiokabel in de "Digital Audio Out/Coaxial"-uitgang van uw audiobron.

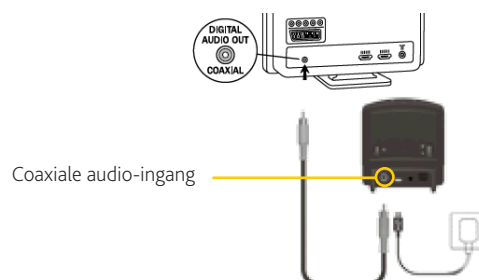

De Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) gebruiken

De tv-streamer koppelen met uw Baha geluidsprocessor

- A** Zorg ervoor dat de tv-streamer is aangesloten op een stopcontact en dat het groene stroomindicatielampje aan is.

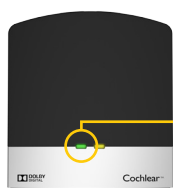

Stroomindicatie-
lampje (groen)


- B** Zet uw geluidsprocessor uit.

- C** Druk eenmaal op de koppeltoets van de tv-streamer om de koppelmodus te activeren.



Koppeltoets

- D** Als het activiteitslampje knippert, is de koppelmodus geactiveerd. De koppelmodus zal 20 seconden actief blijven.

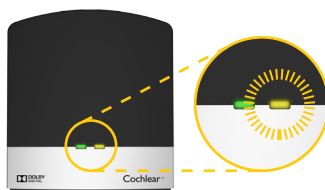

- E** Zet, terwijl het activiteitslampje knippert, uw geluidsprocessor aan.

Opmerking: Als de koppeling gelukt is, hoort u een melodietje dat in uw geluidsprocessor(s) wordt afgespeeld. U bent nu klaar om de tv-streamer te gebruiken!

Meerdere tv-streamers koppelen met één geluidsprocessor

U kunt maximaal drie tv-streamers koppelen met uw geluidsprocessor(s).

Wilt u een tweede of derde tv-streamer koppelen, volg dan de stappen

- A** en **B** links van deze kolom.

- C** Druk vervolgens **twee** of **drie** keer op de koppeltoets van de tweede tv-streamer.

- D** Het gele indicatielampje op de voorkant van de tv-streamer zal nu twee- of driemaal per 2 seconden oplichten om aan te geven dat de tv-streamer klaar is om te worden gekoppeld via kanaal 2 of 3 van de geluidsprocessor.

Toetsdrukken voor koppeling	LED knipperpatroon				Kanaal
1	1	1	1	1	1
2	1 2	1 2	1 2	1 2	2
3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	3

- E** Voltooi het koppelingsproces door de geluidsprocessor(s) aan te zetten.

Starten met streamen via de geluidsprocessor

Na installatie kunt u luisteren naar gestreamde audio vanuit de tv-streamer door middel van de volgende eenvoudige stappen:

Zet eerst uw tv, geluidssysteem of computer aan, druk vervolgens op de toets op uw geluidsprocessor(s) en houd deze ingedrukt (lang drukken). Indien nodig moet dit voor elke geluidsprocessor

afzonderlijk worden gedaan om in beide oren gestreamde audio te horen.

Stoppen met streamen via de geluidsprocessor

Druk de toets op uw geluidsprocessor kort in en laat hem weer los.


Ondersteuning

Uitgebreide informatie over de Cochlear Wireless TV Streamer (draadloze tv-streamer) vindt u in de gebruikershandleiding.

Uitgebreide informatie over de Cochlear Baha geluidsprocessor vindt u in Deel A van de gebruikershandleiding.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com

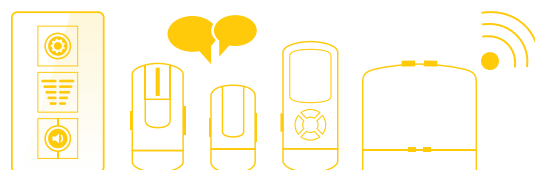

Ga naar **www.cochlear.com** voor meer informatie over ons volledige aanbod van apps en draadloze accessoires.